


DreamMapper 3.0.2

Bluetooth (BT) készülék párosítása

Alvás & légzészavar kezelése
2025. április

1 – Terápiás készülék hozzáadása a DreamMapperhez

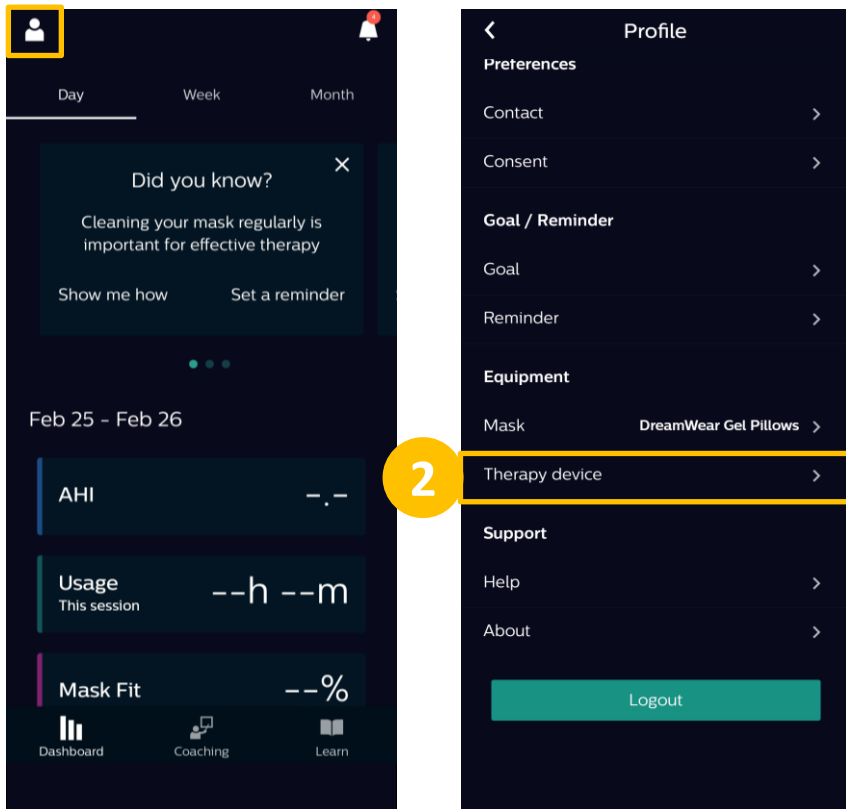

Fontos tanács

- Győződjön meg róla, hogy mindig a legújabb DreamMapper applikációt használja, frissítsen a Google Play vagy IOS App Store-ban, vagy állítsa be az automatikus frissítést a mobileszközén.


1

Kattintson a **Profil** ikonra a bal felső sarokban.

2

Lapozzon lefelé a profiljában a **Berendezés** menüpontra, és koppintson a **Terápiás készülék** sorra.

2 – A terápiás készülék gyári számának megadása

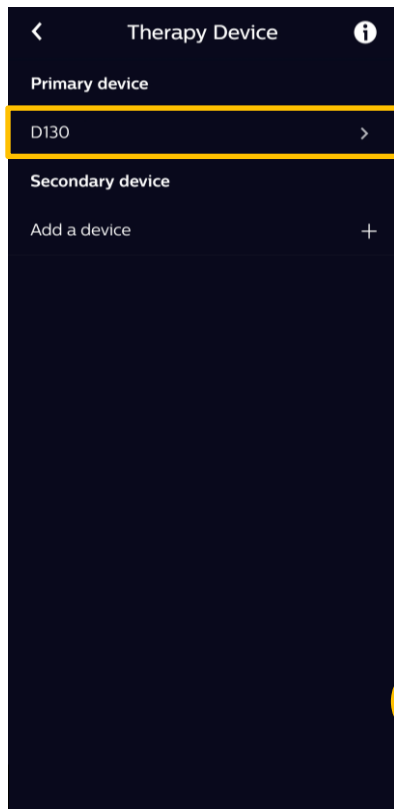

1



Ha az eszköze neve/sorozatszáma már megjelenik:

- Ellenőrizze, hogy megegyezik-e az eszköze alján feltüntetett sorozatszámával.
- Ha ez így helyes, akkor koppintson az eszköz sorozatszámára/nevére a DreamMapper alkalmazásban.

2

Ha az eszköz sorozatszáma nincs a listában, koppintson az „**Eszköz hozzáadása +**” opcióra. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beolvassa a készüléke alján lévő QR-kódot, vagy kézzel beírhatta az eszköz sorozatszámát.

3 – Bluetooth-párosítás elvégzése

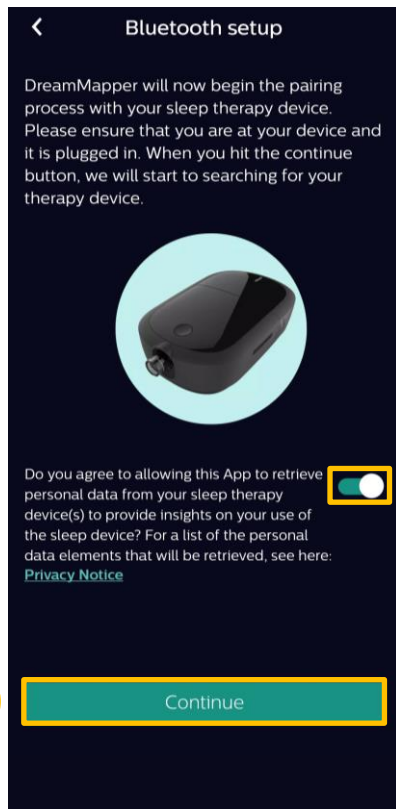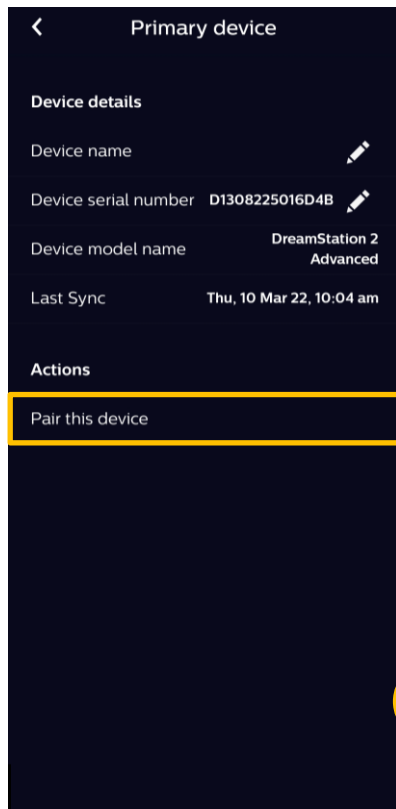

1

Válassza ki az előzőleg megadott eszközt és koppintson a „**Párosítsa ezt az eszközt**” műveletre.

2



Koppintson a kapcsolóra, majd a „**Folytatás**” gombra, hogy elindítsa a Bluetooth párosítást.



Fontos tanácsok

- A terápiás készüléknek a közelben kell lennie, elektromosan csatlakoztatva, miközben a terápia ki van kapcsolva.
- Előfordulhat, hogy mobileszközén engedélyeznie kell a Dream-Mapper számára, hogy „Megtalálja, csatlakoztassa és meghatározza a közeli eszközök relatív helyzetét”. Kérem, fogadja el ezt a kérést a folytatáshoz.

4 –Bluetooth-párosítás megerősítése

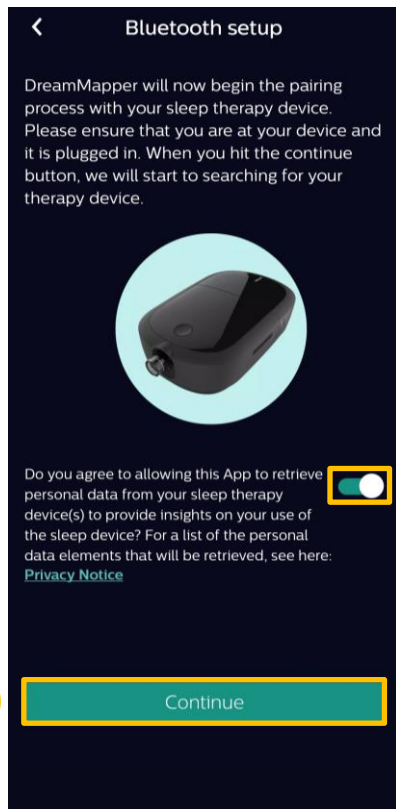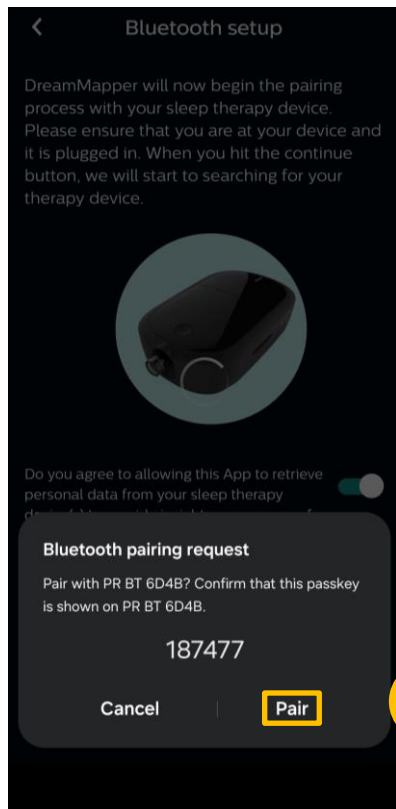

- 1 A DreamMapper alkalmazásban BT párosítási kérelmet fog kapni. Kattintson a „**Párosítás**” gombra.
- 2 A terápiás készüléken is hagyja jóvá a párosítást a DreamMapper-rel, majd koppintson a „**Folytatás**” gombra.





Fontos tudnivalók

A művelet végrehajtására korlátozott idő áll rendelkezésére. Ha túllépi az időkorlátot, a párosítás sikertelen lesz, és újra kell próbálkoznia.

Az terápiás eszközön való jóváhagyáshoz:

- Dreamstation 2: Egyszerűen kattintson a képernyőre.
- Dreamstation 1: Tekerjen egyet jobbra a fehér gombon, majd nyomja meg a gombot az elfogadáshoz.

5 – A Bluetooth-párosítás eredménye

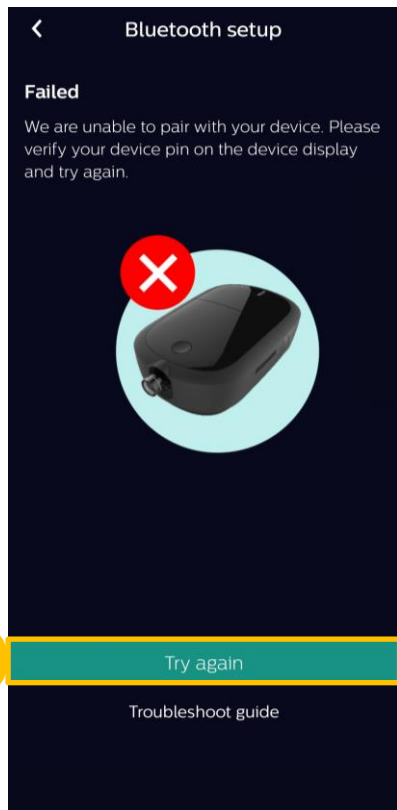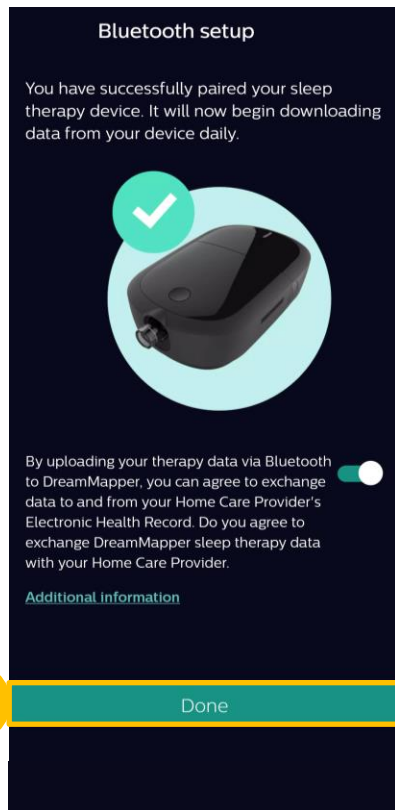



1

Ha a Bluetooth párosítás sikeres, egy zöld pipát fog látni.

2

Ha a Bluetooth párosítás nem sikerült, ne aggódjon! Újra próbálkozhat a párosítással, amíg az sikeresen megtörténik.

6 – A terápiás adatok letöltése

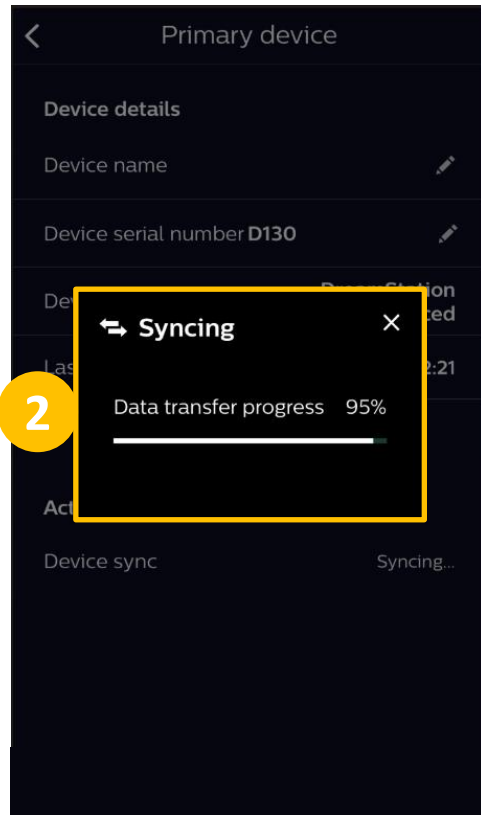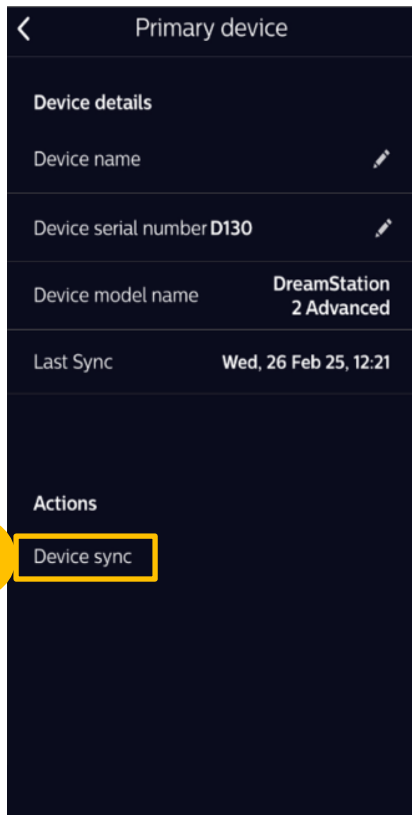

1

Miután a BT párosítás sikeresen megtörtént, kattintson az „**Eszköz szinkronizálás**” gombra a terápiás adatok kézi letöltéséhez.

2

Amint az adatátvitel befejeződött, megtekintheti az adatait a DreamMapper kezdőoldalán.

Jogi vonatkozások

A DreamMapper egy mobilalkalmazás és weboldal, amely az OSA-ban (Obstruktív Alvási Apnoé Szindróma) szenvedők számára készült, hogy segítsen nekik motiváltabbnak maradni és hatékonyabban követni kezelésüket. Ez a szoftver I. osztályú egészségügyi termék és CE-jelöléssel rendelkezik, amelynek megfelelőségi értékelését a TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) végezte el. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Frissítés dátuma: 2025. február.

A DreamMapper internetes elérhetősége:

<https://eu.mydreammapper.com/>

PHILIPS